




PEDIATRIE



**BRONCHIOLITE - ANNEXE :
Montage du kit de Ventilation Non Invasive
pour Bronchiolite du Nourrisson - Elysee**


REDACTION : Cyrille Grange, Damien Venchiarutti
VALIDATION : Bureau de pédiatrie et commission scientifique du RENA U

MAJ du 01/01/2018

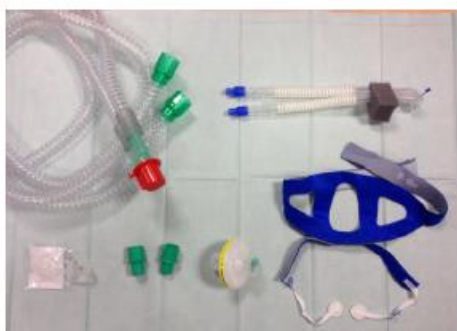


DESCRIPTIF DU KIT COMPLET

- 1 HARNAIS
- 1 Nasal Tubing
- 1 filtre ADULTE
- 2 masques (1 L et 1 XL)
- 1 circuit de ventilation PEDIATRIQUE
- 2 raccords verts (NON INDISPENSABLE)

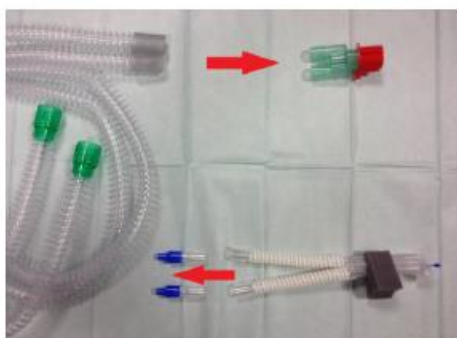

1- DESADAPTER le « Y » du circuit respirateur

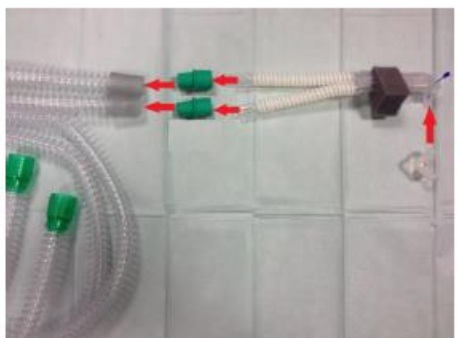

2- DESADAPTER LES EMBOUTS BLEUS
(les conserver pour le service de réanimation)

3- CONNECTER LE « NASAL TUBING » au circuit

LES RACCORDS VERTS ne sont pas indispensables mais assurent une meilleure étanchéité.

5- CHOISIR LE MASQUE ADAPTE, avec la réglette fournie avec le « Nasal Tubing »

6- CONNECTER LE MASQUE CHOISI



6- PLACER LE FILTRE A LA SORTIE D'EXPIRATION


(car ce n'est plus possible après le « Y »)

Installation du Masque sur le Nourrisson

PENSER A LA SONDE GASTRIQUE (BUCCALE), AVANT DE DEBUTER LA VNI



ATTENTION : POSITIONNER LE « NASAL TUBING » (3) AVANT DE RABATTRE LA TOTALITE DU SCRATCH POUR LE FIXER (4)

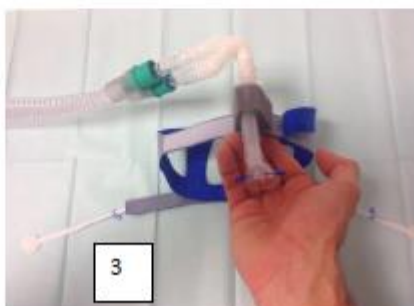

LA MOUSSE FRONTALE EST PREDECOUPEE
POUR PERMETTRE UN REGLAGE EN HAUTEUR DU « NASAL TUBING »

LE MASQUE DOIT ETRE BIEN A PLAT SUR LE VISAGE.

NB : En cas de fuite, ne pas serrer le masque, vérifier son positionnement.



LES ERGOTS BLEUS LATERAUX MOBILES PERMETTANT DE
S'ADAPTER AUX MOUVEMENTS DU NOURRISSON

PLAQUER LE MASQUE A L'AIDE DES SANGLES BLANCHES (5)



NE PAS PLAQUER LE MASQUE SI LE RESPIRATEUR N'EST PAS FONCTIONNEL !!